


TOSI®-FlexiCheck Gebrauchsinformation

Polysaccharid

Testanschmutzung

Blut Testanschmutzung

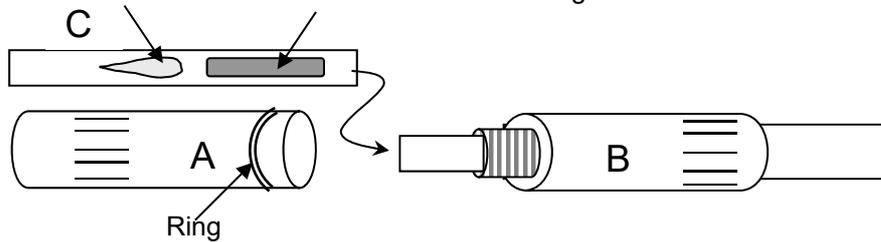

1. FlexiCheck Prüfkörper aufschrauben. Hierzu Teil A mit Ring-Markierung vom Teil B ohne Ring-Markierung abschrauben. (siehe Abbildung)
2. Ein TOSI®-FlexiCheck Edelstahlplättchen (Teil C) aus der Schutzfolie entnehmen und laut Abbildung in Teil B des Prüfkörpers einbringen. Dabei Testanschmutzung nicht berühren!
3. FlexiCheck Prüfkörper wieder zuschrauben.
4. FlexiCheck Prüfkörper an eine Verbindung der Einzelkanalspülung im Waschautomaten anschließen (Luer-Lock) und das Programm nach Herstellerangaben starten.
5. Nach Programmende FlexiCheck aus Waschautomaten entnehmen und Prüfkörper aufschrauben. TOSI®-FlexiCheck entnehmen, ohne die Testanschmutzung zu berühren!
6. Reinigungserfolg visuell beurteilen.

LAGERUNG:

VERKAUFSEINHEIT: 25 Tests

Lagerung in der Schutzfolie bei 2°C-25°C

Schutzfolie erst unmittelbar vor Gebrauch entfernen.

Haltbarkeit: siehe Verpackungsaufdruck

TOSI® – FlexiCheck Troubleshooting Guide

	<p>Positives Ergebnis: Beide Testanschmutzungen vollständig entfernt.</p>
	<p>Ergebnis: Polysaccharide entfernt / Sichtbare Fibrinreste. Anzeichen für: Parameter der Proteinentfernung mangelhaft Optimierung: Überprüfen und/oder verbessern von: Reinigungszeit/ -temperatur, Reinigerdosierung/-typ.</p>
	<p>Ergebnis: Polysaccharidreste sichtbar / Blutanschmutzung entfernt. Anzeichen für: Parameter der Polysaccharidentfernung mangelhaft. Optimierung: Überprüfen und/oder Verbessern von: Wasserqualität / Reinigungszeit und Temperatur, Reinigerdosierung und -typ.</p>
	<p>Ergebnis: Polysaccharide entfernt / Rote Proteinreste sichtbar. Anzeichen für: Denaturierungseffekte (Hitze oder Desinfektionsmittel) Optimierung: Überprüfung auf zu hohe Reinigungstemperaturen oder Desinfektionsmittel im Reinigungsschritt, wenn möglich eine kalte Vorspülung fahren.</p>
	<p>Ergebnis: Polysaccharid und Blutanschmutzung vollständig erhalten. Anzeichen für: Fehlender Durchfluß /Keinerlei Reinigungswirkung. Optimierung: Überprüfung der FlexiCheck-Verbindung, der Maschine und des Programms</p>